




Fecal Occult Blood(iFOB/ Fit) Rapid Self Test

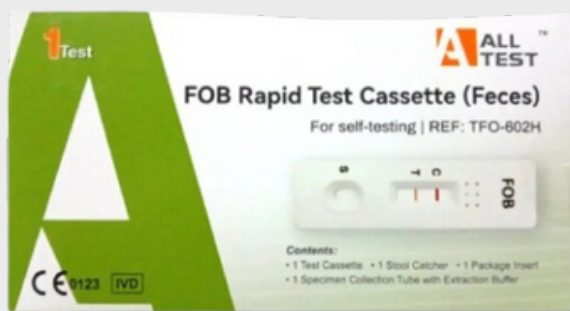

- Το iFOB/ Fit Rapid Test είναι ένας γρήγορος χρωματογραφικός ανοσολογικός έλεγχος για την ποιοτική ανίχνευση του ανθρώπινου απόκρυφου αίματος στα κόπρανα.
- Μόνο για αυτοέλεγχο σε *in vitro* διαγνωστική χρήση.

Πολλές ασθένειες μπορεί να προκαλούν κρυφή αιμορραγία στα κόπρανα.

Αυτό είναι γνωστό ως κρυφή αιμορραγία στα κόπρανα (FOB), ανθρώπινη κρυφή αιμορραγία ή ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη.

Στα αρχικά στάδια, γαστρεντερικά προβλήματα όπως καρκίνος του παχέος εντέρου, έλκη, πολύποδες, κολίτιδα, εκκολπωματίτιδα και ρωγμές μπορεί να μην παρουσιάζουν ορατά συμπτώματα αλλά μόνο κρυφό αίμα.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι guaiac δεν έχουν ευαισθησία και ειδικότητα και απαιτούν επίσης διατροφικούς περιορισμούς πριν από τη δοκιμή.

Η κασέτα ταχείας δοκιμής FOB (Fecal Occult Blood) TFO-602H από την ALL TEST (της Hangzhou Biotech) είναι ένα γρήγορο test κατάλληλο για τον ποιοτικό προσδιορισμό χαμηλών επιπέδων κρυφής αιμορραγίας στα κόπρανα (ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία για τον ποιοτικό προσδιορισμό της ανθρώπινης κρυφής αιμορραγίας στα κόπρανα).

Είναι απλό και εύκολο στη χρήση ενώ παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα σε πέντε μόλις λεπτά.

Το κρυφό αίμα στα κόπρανα μπορεί να υποδηλώνει καρκίνο του παχέος εντέρου ή πολύποδες στο κόλον ή στο ορθό.

Τα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου περιλαμβάνουν:

- Επίμονη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου σας, διάρροια ή δυσκοιλιότητα ή αλλαγή στη συνοχή των κοπράνων.
- Αιμορραγία από το ορθό ή αίμα στα κόπρανα.
- Επίμονα κοιλιακά παράπονα.
- Ανεξήγητη απώλεια βάρους.
- Αδυναμία ή κόπωση.




Ιδιότητες:

- Κασέτα ταχείας δοκιμής FOB (ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία) για τον ποιοτικό προσδιορισμό της ανθρώπινης κρυφής αιμορραγίας στα κόπρανα.
- Εύκολο στη χρήση, με ευανάγνωστα και αξιόπιστα αποτελέσματα (αποδεδειγμένη ακρίβεια σε ποσοστό 99,1%) σε πέντε μόλις λεπτά.
- Χρησιμοποιεί μια δοκιμασία “σάντουιτς” δύο αντισωμάτων για την επιλεκτική ανίχνευση κρυφού αίματος στα κόπρανα σε 50ng ανά ml (ή περισσότερο ή σε 6mg ανά gr) κοπράνων.
- Η ακρίβειά του δεν έχει σχέση με τη διατροφή των ασθενών (σε αντίθεση με τις μεθόδους guaiac).
- Προϊόν με σήμανση CE, ιδανικό για αυτοέλεγχο στο σπίτι (για “*in vitro*” διαγνωστική χρήση).



Χρήση (“in vitro” διαγνωστική χρήση):

- Πριν από τη δοκιμή, περιμένετε μέχρι το δείγμα και το στυλεό να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου (15°C έως 30°C).
- Για τη συλλογή δειγμάτων κοπράνων: Βάζετε το δείγμα κοπράνων στο κατάλληλο δοχείο. Χρησιμοποιείτε τον συλλέκτη κοπράνων για να αποφύγετε τη μόλυνση του δείγματος με οποιοδήποτε είδος χημικού προϊόντος, ώστε το δείγμα να μην είναι νοθευμένο.
- Επεξεργασία δειγμάτων κοπράνων: Ξεβιδώνετε το καπάκι του σωλήνα συλλογής δειγμάτων. Στη συνέχεια, κολλάτε τυχαία τη συσκευή εφαρμογής συλλογής δείγματος σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές θέσεις στο δείγμα κοπράνων (μην σκάβετε το δείγμα κοπράνων).
- Βιδώνετε και σφίγγετε το καπάκι στο σωλήνα συλλογής δειγμάτων. Στη συνέχεια, ανακινείτε δυνατά για να αναμείξετε το δείγμα και το ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης.
- Φέρνετε τη σακούλα σε θερμοκρασία δωματίου πριν την ανοίξετε: Αφαιρείτε την κασέτα δοκιμής από τη θήκη. Την χρησιμοποιείτε το συντομότερο δυνατό.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, εκτελείτε τη δοκιμή αμέσως μετά το άνοιγμα της θήκης από αλουμινόχαρτο.
- Κρατάτε το σωλήνα συλλογής δείγματος σε όρθια θέση και ανοίγετε το καπάκι: Αναστρέφετε το σωλήνα συλλογής δείγματος. Μεταφέρετε δυο σταγόνες από το εξαγόμενο δείγμα (περίπου 80mCL) στο φρεάτιο δείγματος “S” της δοκιμαστικής κασέτας. Στη συνέχεια, ξεκινάτε το χρονόμετρο.
- Αποφεύγετε την παγίδευση φυσαλίδων αέρα στο φρεάτιο δείγματος “S”.

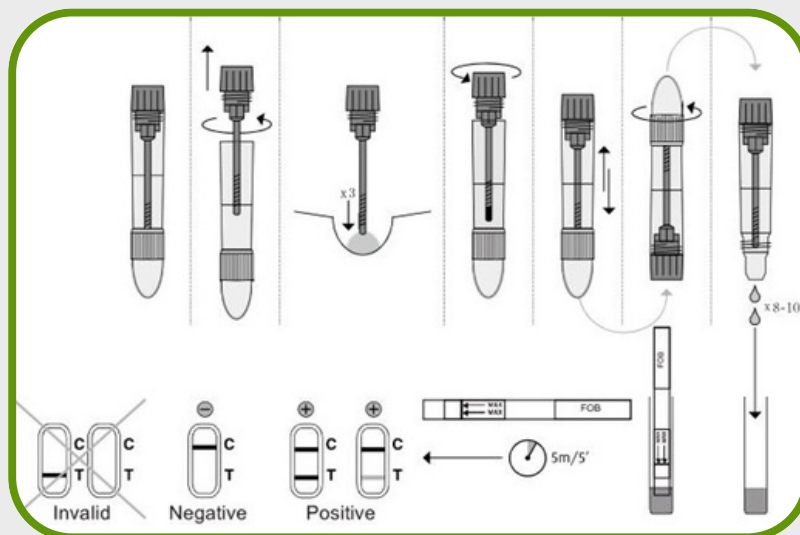

Διαβάζετε το αποτέλεσμα: Μετά από πέντε λεπτά (μην διαβάζετε τα αποτελέσματα μετά από δέκα λεπτά).
Ερμηνεία αποτελεσμάτων:

1. **Θετικό:** Δύο γραμμές, μια έγχρωμη γραμμή στην περιοχή της γραμμής ελέγχου “C”, ενώ ένα άλλο πρέπει να είναι ορατό στην περιοχή της γραμμής δοκιμής “T”.
2. **Σημείωση:** Η ένταση του χρώματος στην περιοχή της γραμμής δοκιμής “T” θα ποικίλλει ανάλογα με τη συγκέντρωση κρυφού αίματος κοπράνων που υπάρχει στο δείγμα.
3. **Επομένως,** οποιαδήποτε απόχρωση στην περιοχή της γραμμής δοκιμής “T” είναι ενδεικτική ενός θετικού αποτελέσματος.
4. **Αρνητικό:** Μόνο μία έγχρωμη γραμμή στην περιοχή γραμμής ελέγχου “C” (δεν έχει γραμμή στην περιοχή δοκιμαστικής γραμμής “T”).
5. **Άκυρο (invalid):** Η γραμμή ελέγχου δεν εμφανίζεται (οι πιο πιθανές αιτίες της έλλειψης γραμμής ελέγχου είναι ο ανεπαρκής όγκος δείγματος ή το σφάλμα στις διαδικαστικές τεχνικές), επανεξετάστε τη διαδικασία και επαναλάβετε την ανάλυση με ένα νέο test



Κατάλογος 2024 /
Catalogue 2024

ANATS S.A. Imports-Exports-Distribution of Medical &
Hospital Products
Πατριάρχου Ιωακείμ 13, Ταύρος TK 17778,
Τηλ. 210-7623213 FAX 210-7625077
Email. info@anats.gr WEB Site <http://www.anats.gr>